

Näsrening steg för steg (bruksanvisning till Benny nässug)

Förberedelse:

Anslut dammsugaren till nätet. (Stick in kontakten i vägguttag). Placera dammsugaren så nära att man skall lätt kunna nå och manövrera den.

1. Anslut apparaten.

Placera den klockformade kopplingen i dammsugarlangen.

2. Slå på dammsugaren.

Nässugen är utformad så att dess vakuum hålls konstant på 0,02 bar. Detta garanterar säker användning även hos spädbarn.

3. Placera munstycket i näsborren på lämpligt sätt.

Silikon slangen skall vara uppåt (enl. bilden på förpackningen). Sug inte vätska längre tid än 5 sekunder.

Om det behövs upprepa vätskesugningen under flera 5 sekunders intervaller med 3-5 sekunders pauser imellan.

Upprepa så länge det rinner ut vätska i behållaren.

4. Ta bort munstycket från näsborren.

5. Slå av dammsugaren.

Ta isär munstycke och behållare. Skölj rent under rinnande vatten. Delarna kan rengöras i kokande vatten eller med steriliserande vätska.

6. Nässugen kan tas isär i 5 delar för att underlätta rengöringen och steriliseringen.

7. När delarna har torkat, förvara delarna på ett torrt ställe tills apparaten skall användas igen.

Ej lämplig för patienter som lider av blödarsjuka!

<https://nässug.se>

2020 © Förkylning hos barn